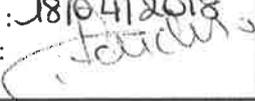


	REPLISSAGE D'UNE CASSETTE POUR PCA	PRT.SOIN.13
		Version : 2
		Pages : 1 sur 2
		Mise en application : 18/04/2018
Rédacteur : C. GILARDINO Fonction : Cadre de santé Date : 18/04/2018 Visa : 	Vérificateur : N. POLETTI Fonction : IDE Hygiéniste Date : 18/04/2018 Visa : 	Approbateur : L. FARGIER Fonction : Directrice des Soins Infirmiers Date : 18/04/2018 Visa : 

I. Objet

Ce protocole décrit le remplissage d'une cassette permettant un fonctionnement de la pompe PCA.

II. Domaine d'application

Ce protocole s'applique aux patients bénéficiant d'un un système d'administration de traitement par PCA.

III. Références réglementaires et normatives

- Décret d'actes et d'exercice infirmier N° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code

IV. Responsabilités

Ce protocole est sous la responsabilité des IDE.

V. Déroulement du protocole

5.1. Matériel

- 1 Cassette (50 ou 100 ml)
- 1 Champ Stérile
- 1 Seringue de 60 ml
- 1 Trocard
- 1 Paire de gants stériles
- 1 Blouse IDE
- 1 Charlotte
- 1 Masque
- 1 Prolongateur Cadd + valve anti siphonage (si PCA branchée en VVC ou VVP)
- 1 Prolongateur Cadd mâle mâle (si PCA branché en sous cutanée)
- 1 Paquet de 2 compresses
- Bétadine dermique (jaune) ou autre antiseptiques (si allergie à l'iode) : biseptine

5.2. Préparation au remplissage

- Pratiquer un lavage des mains.
- S'habiller : masque, charlotte, blouse.
- Installer le champ stérile sur l'adaptable ou autre support propre.
- Prendre le nombre nécessaire d'ampoule du produit à remplir.
- Les placer sur le côté de l'adaptable (pas sur le champ).
- Disposer sur le champ stérile de manière aseptique :
 - Les compresses et y déposer une quantité suffisante de bétadine ou autre
 - La seringue de 60 ml
 - Le trocard
 - La cassette
 - La paire de gants
- Prendre (sans gant) la compresse par un coin et casser l'embout des ampoules.

5.3. Remplissage de la cassette

- Mettre les gants
- Adapter le trocard à la seringue de 60 ml
- Aspirer le contenu des ampoules
- Purger l'air de la seringue
- Retirer le trocard
- Adapter la seringue à la cassette
- Déclamper la petite tubulure de la cassette
- Remplir le réservoir souple de la cassette (contenance max : 110 ml)
- Faire la purge du réservoir à la seringue
- Clamper
- Retirer la seringue
- Adapter le prolongateur adéquat selon la voie d'administration
- Solidariser la cassette et la PCA et verrouiller avec la clef
- Appuyer sur le bouton « purge » de la PCA pour chasser l'air du prolongateur

La PCA est alors prête à fonctionner.

5.4. Recommandations

Pour les prolongateurs Cadd anti siphonage : le bouchon bleu est vissé sur la PCA et le transparent sur la tubulure (« bleu vers le ciel »).

S'assurer du bon fonctionnement des piles (et d'une réserve au domicile)

Positionner correctement la petite tubulure dans l'encoche sur le côté de la PCA.

VI. Annexes :

Annexe 1 : FOR.DOUL.06. Livret à destination des infirmiers de l'HAD, Informations et consignes pour la prise en charge d'un patient porteur d'une PCA